



INDIKASI

Cairan pembersih instrument bedah bekas pakai dan instrument medis lainnya dalam tahapan cleaning pada proses dekontaminasi.

KARAKTERISTIK

- Tri-enzyme complex terdiri dari enzyme protease, enzyme lipase, dan enzyme amilase yang membantu mengurai darah dan kotoran biologis lainnya.
- Detergent complex membantu mengangkat kotoran dan bersifat non korosif.
- Desinfektan mampu membunuh (*Staphilococcus aureus*, *E-coli*, *candida albicans*, dan lain sebagainya) dalam waktu 5 menit perendaman.

KOMPOSISI

Ammonium quaternary propionate
Chlorhexidine gluconate
Tri enzyme complex (protease, lipase, amylase)

PERINGATAN PENGGUNAAN

Bahan kimia berbahaya, ikuti petunjuk penggunaan.
Penyimpanan dengan suhu antara +5°C sampai +35°C.
Hanya digunakan oleh profesional.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Tuangkan Alkessi Descleanzyme sebanyak 25 ml kedalam 5 liter air bersih.
- Rendam keseluruhan instrumen medis. Lama perendaman minimal 5 menit. Sikat jika diperlukan.
- Bilas dengan air mengalir.
- Keringkan dengan handuk bersih, selanjutnya lakukan proses berikutnya.

KEMASAN

- Galon 5 L



Diproduksi oleh :

PT. Komitkami Intinusa Gemilang

Komplek Bitzpark 3 Bekasi Blok E/20
Jl. Sultan Agung, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi – Jawa Barat 17133, Indonesia

Didistribusikan oleh :

PT. Prima Alkesindo Nusantara

Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah Blok C No. 12-15
Jalan Bukit Gading Permai – Jakarta Utara 14240,
Indonesia