



INDIKASI

Cairan desinfektan tingkat tinggi untuk mendesinfeksi instrument endoscopy, instrument bedah dan instrument lainnya yang sensitive terhadap perubahan suhu.

KARAKTERISTIK

- Larutan 2% Glutaraldehyde dengan pH 6.
- Cairan berwarna hijau jernih.
- Bersifat non korosif.
- Kompatible untuk semua jenis bahan instrument medis.
- Dapat membunuh mikrobiologi sampai dengan spora bakteri.

KOMPOSISI

Glutaraldehyde 2%

PERINGATAN PENGGUNAAN

Bahan kimia berbahaya, ikuti petunjuk penggunaan.
Penyimpanan dengan suhu antara +5°C sampai +35°C.
Hanya digunakan oleh profesional.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Tuangkan Alkessi Glu kedalam bak rendam tertutup (**tidak dilakukan pengenceran/ pencampuran dengan air**).
- Rendam intstrumen medis / endoscopy dengan sempurna selama 10 menit sampai dengan 60 menit.
- Bilas menggunakan air steril mengalir.
- Keringkan dengan handuk/ kain steril, selanjutnya simpan dalam lemari steril.

KEMASAN

- Galon 5 L



Diproduksi oleh :

PT. Komitkami Intinusa Gemilang

Komplek Bitzpark 3 Bekasi Blok E/20
Jl. Sultan Agung, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi – Jawa Barat 17133, Indonesia

Didistribusikan oleh :

PT. Prima Alkesindo Nusantara

Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah Blok C No. 12-15
Jalan Bukit Gading Permai – Jakarta Utara 14240,
Indonesia