



PreClean ALKESSI

INDIKASI

Precleaning instrument bedah, instrument medis, endoscopy dan lainnya setelah pemakaian selama proses transport dan penyimpanan dalam keadaan kotor sebelum dilakukan proses cleaning.

KARAKTERISTIK

- Tri-enzyme complex terdiri dari enzyme protease, enzyme lipase, dan enzyme amilase yang membantu mengurai darah dan kotoran biologis lainnya.
- Detergent complex membantu mengangkat kotoran dan bersifat non korosif.
- Desinfektan mampu membunuh Bakteri, Fungi, dan Virus
- Pelembab alami yang mampu menjaga kelembaban instrument selama 72 jam

KOMPOSISI

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride, Surfaktan, 3 enzyme complex (protease, lipase, amylase) dan bahan tambahan lainnya

PERINGATAN PENGGUNAAN

Bahan kimia berbahaya, ikuti petunjuk penggunaan.
Penyimpanan dengan suhu antara +5°C sampai +35°C.
Hanya digunakan oleh profesional.

Diproduksi oleh :

PT. Komitkami Intinusa Gemilang

Komplek Bitzpark 3 Bekasi Blok E/20
Jl. Sultan Agung, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi – Jawa Barat 17133, Indonesia

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Pisahkan instrument bedah bekas pakai dengan kasa bekas pakai atau bahan biologis lainnya.
- Hilangkan paparan iodine pada instrument (jika ada) dengan kain kasa.
- Sediakan container penyimpanan untuk intrumen bedah bekas pakai, semprotkan lapisan dasar container dengan ALKESSI PRECLEAN.
- Susun instrument bedah bekas pakai diatas lapisan foam ALKESSI PRECELAN secara baik dan terbuka.
- Semprotkan kembali bagain atas instrument bedah bekas pakai yang telah disusun.
- Tutup container dan kirimkan CSSD.
- ALKESSI PRECLEAN dapat menjaga instrument selama 72 jam.

EFIKASI

- Bakterisidal
- Fungisidal
- Virusidal

KEMASAN

- Botol 750 ml



Didistribusikan oleh :

PT. Prima Alkesindo Nusantara

Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah Blok C No. 12-15
Jalan Bukit Gading Permai – Jakarta Utara 14240,
Indonesia