



INDIKASI

Cairan pembilas instrument pada mesin washer atau washer disinfector sehingga instrument bebas dari residu detergen dan lainnya, bekerja dengan cara mengurangi tekanan air sehingga dapat mempersingkat waktu proses pengeringan.

KARAKTERISTIK

- Menghilangkan residu pada permukaan instrumen.
- Mengurangi tekanan air pada permukaan instrumen

KOMPOSISI

Non ionic surfactant, Alkohol, dan bahan pencampur lainnya

PERINGATAN PENGGUNAAN

Bahan kimia berbahaya, ikuti petunjuk penggunaan.
Penyimpanan dengan suhu antara +5°C sampai +35°C.
Hanya digunakan oleh profesional.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Penggunaan pada mesin cuci otomatis ;
- Tuangkan Alkessi Rinse pada container pembilasan sebanyak 5 ml per liter air
 - Lakukan settingan mesin washer dengan komposisi pembilas 5 ml per liter air.

KEMASAN

- Galon 5 L



Diproduksi oleh :

PT. Komitkami Intinusa Gemilang

Komplek Bitzpark 3 Bekasi Blok E/20
Jl. Sultan Agung, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria,
Kota Bekasi – Jawa Barat 17133, Indonesia

Didistribusikan oleh :

PT. Prima Alkesindo Nusantara

Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah Blok C No. 12-15
Jalan Bukit Gading Permai – Jakarta Utara 14240,
Indonesia