



## INDIKASI

Spray foam desinfektan detergen untuk membersihkan dan mendesinfeksi area permukaan dan peralatan medis non invasive.

## KARAKTERISTIK

- Formula tanpa parfume dan alcohol
- Aksi ganda : membersihkan dan mendesinfeksi permukaan.
- Efektif melawan bakteri dan jamur.
- Sesuai dengan semua jenis permukaan di lingkungan medis.

## KOMPOSISI

Didecyldimethylammonium chloride dan bahan pencampur lainnya

## PERINGATAN PENGGUNAAN

Bahan kimia berbahaya, ikuti petunjuk penggunaan.  
Penyimpanan dengan suhu antara +5°C sampai +30°C.  
Hanya digunakan oleh profesional.

## INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Semprotkan Alkessi Surf pada kain yang bersih dan kering.
- Semprotkan sebanyak 10 spray (6 ml) untuk satu meter persegi.
- Sebarkan secara merata pada area tersebut.
- Biarkan beberapa saat untuk proses inaktivasi mikroba.
- Tidak diperlukan membilas kecuali pada area yang akan bersentuhan dengan kulit atau mukosa.

## KEMASAN

- Botol 750 ml



Diproduksi oleh :

**PT. Komitkami Intinusa Gemilang**

Komplek Bitzpark 3 Bekasi Blok E/20  
Jl. Sultan Agung, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria  
Kota Bekasi – Jawa Barat 17133, Indonesia

Didistribusikan oleh :

**PT. Prima Alkesindo Nusantara**

Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah Blok C No. 12-15  
Jalan Bukit Gading Permai – Jakarta Utara 14240,  
Indonesia